

Quick-Guide: MELAcontrol Wash Check

Testsystem zur routinemäßigen Überprüfung der Reinigungsleistung Ihres Thermodesinfektors.
Test system for routine check of the cleaning performance of your washer-disinfector.



1. Halterungen installieren / Installing the holder


Platzieren Sie die Halterung für die Außenreinigung am Basiskorb. Die Halterung für die Innenreinigung installieren Sie auf der Injektorschiene. Verwenden Sie hierfür den im Lieferumfang enthaltenen Schlauchanschluss und Schlauchzuschnitt.

Place the holder for external cleaning on the basis basket. Install the holder for internal cleaning on the injector rail. Use the hose connection and hose cut included in the scope of delivery for this.

2. Indikator einlegen / Inserting the indicator

Entnehmen Sie einen einzelnen Indikator aus der Verpackung und setzen Sie diesen in die dafür vorgesehene Halterung ein. Benutzen Sie für die Überprüfung der Außenreinigung den Halter ME01073 und für die Innenreinigung den Halter ME01074. Und starten Sie das gewünschte Aufbereitungsprogramm.

Remove a single indicator from the packaging and insert it into the matching holder. Use the ME01073 holder to check the external cleaning and the ME01074 holder for internal cleaning. And start the desired programme.

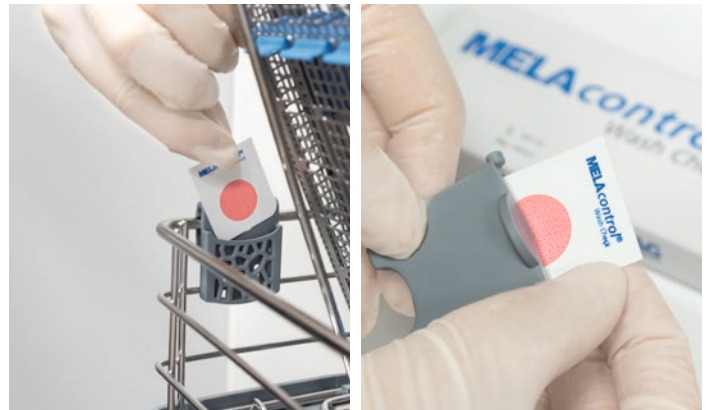

3. Indikator überprüfen / Checking indicator

Ist nach Programmende der Farbpunkt des Wash Checks vollständig entfernt*, kann von einer ordnungsgemäßen Reinigungsleistung ausgegangen werden.

*Ein leichter, gleichmäßiger Farbauftrag ist zulässig.

If the color dot of the wash check is completely removed at the end of the program, it can be assumed that the cleaning performance is sufficient.*

** A light, even application of paint is permissible.*



4. Ergebnis dokumentieren / Documenting results

Dokumentieren Sie das Ergebnis mit Datum, Name und Chargennummer entweder auf einem separaten Dokumentationsblatt oder in einer Softwarelösung.

Document the result with date, name and batch number either on a separate documentation sheet or in a software solution.

