

Checkliste

Herstellerempfehlungen zum Routinebetrieb von Siegelgeräten

Siegelgerät: _____ Seriennummer: _____

Tägliche Kontrolle vor Praxisbeginn:

Erstellen Sie bitte eine Probesiegelnaht und prüfen Sie diese wie folgt

Visuelle Prüfung					Mechanische Prüfung				Monat / Jahr
Die Siegelnaht ist gleichmäßig und vollständig ausgeprägt und weist keine Falten oder Fehlstellen auf.		Die Siegelnaht ist farblich identisch mit der werkseitigen Siegelnaht (Industrienah).			Peeltest: Sterilisieren Sie eine Folienverpackung und öffnen Sie diese anschließend. Die Papierseite muss sich nahezu rückstandslos von der Folienseite lösen.		Überprüfung der Zugfestigkeit Die aufgewendete Kraft beim Öffnen der Siegelnaht muss ebenso groß sein wie die, die zum Öffnen der werkseitigen Siegelnaht erforderlich ist.		
Tag	OK	nicht OK	OK	nicht OK	OK	nicht OK	OK	nicht OK	Unterschrift:
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Wöchentliche Kontrolle:

Prüfen Sie mit MELAG Seal Check oder MELAink Test die Siegelnaht.

KW		KW		KW		KW		KW	
OK	nicht OK	OK	nicht OK	OK	nicht OK	OK	nicht OK	OK	nicht OK
Unterschrift:		Unterschrift:		Unterschrift:		Unterschrift:		Unterschrift:	



Als jährliche Routinekontrolle empfiehlt MELAG die Prüfung der Siegelnaht auf Zugfestigkeit, den sogenannten Siegelnahtfestigkeitstest gemäß DIN EN 868-5, Anhang D. Das Auftragsformular kann von der MELAG Webseite geladen werden.

Monatliche Endkontrolle: _____

Unterschrift Hygienebeauftragte(r)