

Checkliste zur Herstellerempfehlung zum Routinebetrieb für Siegelgeräte:  
täglich, wöchentlich, jährlich

Täglich vor Praxisbeginn									Monat/Jahr:
Herstellen und Prüfen einer Probesiegelnaht									
Visuelle Prüfung				Mechanische Prüfung					
Die Siegelnaht soll gleichmäßig und vollständig ausgeprägt sein und keine Falten oder Fehlstellen aufweisen.		Die Siegelnaht soll mit der werkseitigen Siegelnaht (Industrienah) am Rand farblich identisch sein		<b>Peeltest:</b> Das Papier muss sich beim Peelen nahezu rückstandsfrei von der Folie lösen.		<b>Überprüfung der Zugfestigkeit:</b> Die aufgewendete Kraft beim Öffnen der Siegelnaht muss ebenso groß sein wie die, die zum Öffnen der werkseitigen Siegelnaht, erforderlich ist.			
Tag	OK	nicht OK	OK	nicht OK	OK	nicht OK	OK	nicht OK	Prüfer
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Wöchentliche Kontrolle				
Prüfung der Siegelnaht mit Hilfsmitteln				
Seal Check: Visuelle Kontrolle der Siegelnaht mit MELAG seal check und Dokumentation des Ergebnisses				
KW:	KW:	KW:	KW:	KW:
<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> n. OK	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> n. OK	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> n. OK	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> n. OK	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> n. OK
_____	_____	_____	_____	_____

Als **jährliche Routinekontrolle** empfehlen wir die Prüfung der Siegelnaht auf Zugfestigkeit, die sogenannten **Siegelnahtfestigkeitsprüfung**, gemäß DIN EN 868-5, Anhang D. Das Auftragsformular kann von der MELAG Webseite (<http://www.melag.de/service/download-center/herstellerempfehlung>) heruntergeladen werden.

Monatliche Endkontrolle: \_\_\_\_\_  
Unterschrift (Hygienebeauftragte(r))